



Anlegen & Loslegen mit VITAR

01



Power ON/OFF

Zum Einschalten der VR-Brille auf den EIN/AUS-Knopf drücken



Volume

Lautstärke einstellen



02




Aufsetzen und Größe anpassen

Einfache Anpassung für einen sicheren Halt mittels Klettverschlüsse.



03

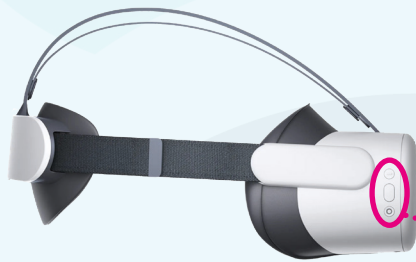

Re-Center


Neuzentrierung für 1 Sekunde gedrückt halten



04

Augentracking

Schauen Sie für 2 Sekunden auf ein Objekt um den gewünschten Inhalt zu wählen. Dieser startet dann automatisch.

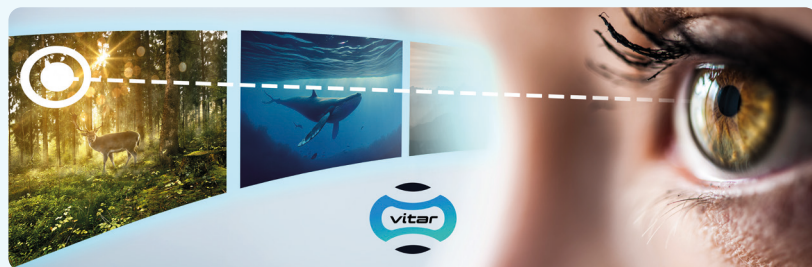

VR-Brille: direktes Sonnenlicht vermeiden!

www.vitar-vr.com